

* 2017年 11月 改訂 (第2版) (新記載要領に基づく改訂)
2011年 12月 作成 (第1版)


機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 チューブ用クランプ 43223000

アグリス鉗子

【形状・構造及び原理等】

＜形状＞

先端部の2つの咬み合い部によって、把持、結合又は圧迫する。

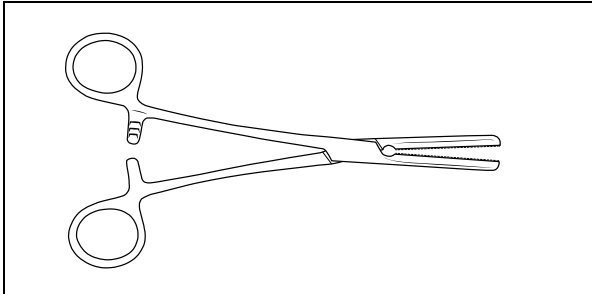

* 【使用目的又は効果】

* チューブを遮断するか、つまむための器具をいう。
本品は再使用可能である。

* 【使用方法等】

1. 使用前に、必要に応じて洗浄・消毒する。
2. ハンドルを操作し、チューブを遮断もしくはつまむ。
3. ラチェットを開閉してロックする。

【使用上の注意】

1. 先端を損傷したり、硬いものに接触させたりして変形や損傷が生じると、器具・器械の寿命が著しく低下する。
2. 一度閉じたラチェット部を開くとき、構造上一度閉じる方向に戻した後開くこと。
3. 本品は未滅菌のため、必要に応じて洗浄、滅菌等を行うこと。

* 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
・ 水濡れに注意し、直射日光・紫外線・高温多湿を避けて、室温で保管すること。

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 株式会社アグリス
福岡県八女市鶴池 477-1
TEL 0943-30-1177