



業界初!! 単回使用の処置キット

🐾 単回使用だから衛生的

🐾 準備・片付けの省力化

🐾 在庫スペースを節約

🐾 手技を統一して感染対策

🐾 キット導入で業務改善

処置に必要な器具・衛生材料をキット化しておりますので、準備・片付け・滅菌にかかる作業時間を短縮し、作業コストの低減を図ることができます。



トータルコストの削減!!

製品仕様





薬液槽付き

トレーには薬液槽が2つ付いています。
消毒剤は別途ご準備ください。

販売名	ワンニャンオペキット	規格	WNF-001
クラス分類	動物用一般医療機器	品目仕様	EOG 滅菌品
一般的名称	医療用刀	単価 (税抜)	500 円 / 個
届出番号	28 動薬第 3985 号	入数	10 個 / 箱

内容部材 (WNF-001)

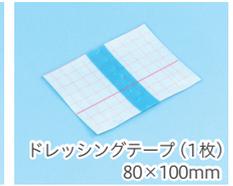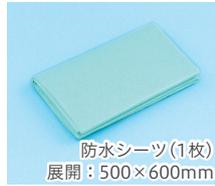

PASスティックのスポンジは繊維のほつれがほとんどなく、剃毛後の皮膚へスムーズに消毒剤を塗布できます。また、吸液と放液の効率が良いので、消毒剤を有効に使えます。

毛に絡まない

接着剤不使用

使用手順例



ASTECK を開封する。
※滅菌済みですので、開封後すぐにお使いいただけます。



薬液槽に消毒剤を 1.5mL 程注ぎ、PASスティックを浸す。
※十分に吸液するまで 30 秒間ほどかかります。



PAS スティックで処置部位を消毒する。
※PASスティックは2本入りですので、2種類の消毒剤でもご使用できます。



シートを広げ、処置を行う。



処置後、トレーをごみ入れとして廃棄する。
※必要に応じて処置部位の創保護にドレッシングテープをお使いください。

※本製品を取り扱う際、スカルペルの刃先に触れてけがをしないように、取り扱いには注意してください。

※処置に不足している器材があれば、あらかじめ準備しておいて下さい。

※本製品は単回使用です。再使用・再滅菌はできません。

本製品使用例の動画を右記の QR コードからご覧いただけます。
【内容：ネコ去勢手術】



製造販売元

株式会社アグリス

福岡県八女市鶴池 477-1 TEL : 0943-30-1177

www.aglis.co.jp